



医師向け マチガターの使い方




マチワイヤ MD を入れ爪のフチを広げます。マチワイヤ MD 単独で痛みが無い例ではマチガターは不要です。

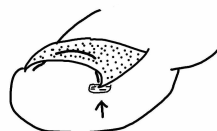


爪のフチに米粒大の綿を入れてみて、爪と皮膚の間に隙間が作れるか調べます。

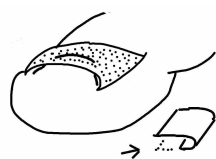


マチガターの長さ見て切ります。通常、25mm のマチガターの半分くらいです。マチガターの幅 1/3 くらいに切り、断面を J 型にします。

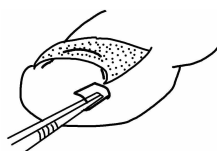


細いピンセットをマチガターに深く入れ、皮膚を爪からはがしながら挿入します。

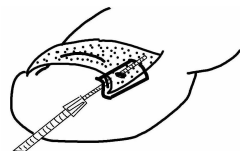


0.5mm のドリルで爪とマチガターを貫通して下から上に穴を開けます。同じ穴に 23G の注射針を通します。

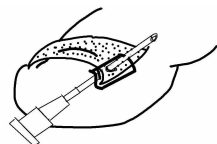


注射針の内腔が詰まっているので、先端から付属のステンレス・ワイヤを通してデブリを除去します。

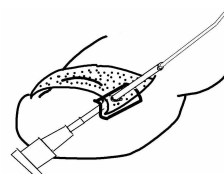

ナイロン糸の端を斜めに少し切り尖らせます。針の先端からナイロン糸を通します。

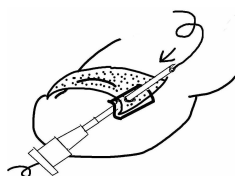

糸を残して注射針を抜き持針器で縫合します。外科用接着剤 アロンアルファ A(三共)でマチガターと糸を固定します。 マチサックを被せます。

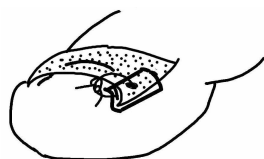

詳細は tama-medical.com

医療機器製造販売届出番号: 13B3X10163000004

2017年9月24日

多摩メディカル